

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Trójnóg inwalidzki aluminiowy

(typ na wysokich nogach)

Kod produktu: JMC-C 2680SL




1. Wykonanie

Trójnóg inwalidzki wykonany jest z aluminiowo-stalowej ramy. Posiada chromowaną, ergonomiczną rączkę regulowaną na wysokość, zakończoną miękkim piankowym uchwytem oraz malowaną proszkowo podstawę z trzema punktami podparcia.

a) uchwyt

b) regulacja wysokości – sztyft blokujący

c) gumowa nasadka

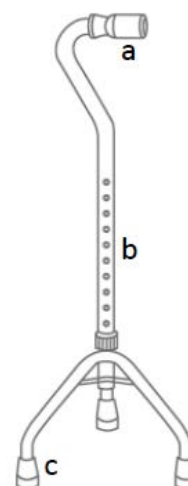

2. Zastosowanie

Trójnóg inwalidzki jest sprzętem pomocniczym przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecany jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi. Konstrukcja z trzema punktami podparcia zapewnia znacznie większą stabilność niż zwykłe laski.

Przeciwwskazania: Zaburzenia koordynacji, zaburzenia równowagi, zaawansowane zmiany reumatyczne, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające wspieranie się na trójnogu.

3. Regulacja

- Aby wyregulować trójnóg, należy wcisnąć metalowy sztyft i wybrać odpowiednią pozycję wewnętrznej rurki. Po ustawieniu ponownie zablokować położenie rurek względem siebie przy pomocy metalowego sztyftu. Trójnóg jest regulowany skokowo co 2,5 cm w rozmiarze 77-98 cm.
- Długość trójnogu dobiera się w pozycji stojącej z kończyną górną zgiętą w stawie łokciowym pod kątem 30°.
- Trójnóg powinien być indywidualnie dostosowany do użytkownika w taki sposób, aby uchwyt znajdował się na wysokości stawu biodrowego.
- Przed użyciem należy sprawdzić właściwe ułożenie sztyftu i upewnić się, że trójnóg jest stabilny.

UWAGA! W razie wątpliwości co do sposobu/techniki poruszania się za pomocą trójnogu, należy skonsultować się z osobą posiadającą odpowiednią wiedzę lub kwalifikacje.

4. Specyfikacja techniczna

TYP: regulowany

Kolor trzonu: srebrny

Kolor podstawy: czarny

Uchwyt: czarny, piankowy

Wysokość: 77-98 cm

Maksymalne obciążenie: 100 kg

Waga: 0,6 kg

Wymiary podstawy: 24,5 cm x 29,5 cm

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad

bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.










6. Konserwacja i czyszczenie

- Trójnóg należy czyścić regularnie używając tylko wody i łagodnych detergentów mających atest PZH.
- **Nie należy używać** do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).
- Zaleca się regularną kontrolę gumowej nasadki. W przypadku zużycia, należy wymienić nasadkę na nową.

7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

8. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.
Dowiedz się więcej na www.timago.com
Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021