

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Laska dla niewidomych, składana


Kod produktu: TGR-R LA 853N



1. Wykonanie

Laska dla niewidomych z gumowym uchwytem i paskiem nadgarstkowym składa się z czterech aluminiowych członów połączonych podwójną, wytrzymałą linką. Trzon zakończony jest wymienną obrotową końcówką. Laska posiada taśmy odblaskowe zwiększające poziom bezpieczeństwa oraz ułatwiające kierowcom i innym użytkownikom dróg identyfikację niewidomego.

- a) uchwyt
- b) pasek nadgarstkowy
- c) taśma odblaskowa
- d) obrotowa końcówka

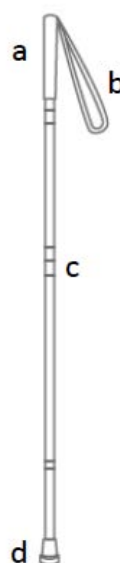

2. Zastosowanie

Laska przeznaczona jest dla osób niewidomych i niedowidzących, umożliwia użytkownikowi samodzielne rozpoznanie terenu. Chroni przed zderzeniem z przeszkodami, które znajdują się na drodze, a także sygnalizuje innym osobom niepełnosprawność wzroku użytkownika.

3. Specyfikacja techniczna

TYP: 4 członowa

Kolor: srebrna

Wysokość: 122 cm

Długość po złożeniu: 36,5 cm

Rączka: gumowa z uchwytem nadgarstkowym

Maksymalne obciążenie: 100 kg

Waga laski: 0,2 kg

4. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.










5. Konserwacja

- Laskę należy czyścić regularnie używając tylko wody i łagodnych detergentów mających atest PZH. Po czyszczeniu laskę należy wypolerować do sucha.
- Nie należy używać do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).
- Należy systematycznie sprawdzać gumową linkę w miejscu łączenia się członów, w przypadku przetarcia, pęknięcia lub naderwania należy przerwać użytkowanie laski.
- Zaleca się regularną kontrolę gumowej nasadki. W przypadku zużycia, należy wymienić nasadkę na nową.

6. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

7. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na www.timago.com
Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021