

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przeciwodleżynowa poduszka pneumatyczna

Kod produktu: TGR-R PP 474



1. Wykonanie

Przeciwodleżynowa poduszka pneumatyczna składa się z komory powietrznej, w której zainstalowany został samopompujący się zawór regulacyjny. Poduszka wyposażona jest w zdejmowany pokrowiec, wykonany z dwóch rodzajów tkanin. W górnej części pokrowca znajduje się tkanina paroprzepuszczalna, odporna na działanie wilgoci, a w dolnej - tkanina antypoślizgowa, zabezpieczająca poduszkę przed przesuwaniami się. Poduszka samoczynnie napełnia się powietrzem dzięki zastosowaniu zaworu regulacyjnego. Poduszka dostosowuje się do kształtu ciała użytkownika, dzięki wykorzystaniu adaptowalnej komory powietrznej. Zestaw zawiera: komorę poduszki, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym.

2. Zastosowanie

Przeciwodleżynowa poduszka pneumatyczna należy do sprzętów pomocniczych przeznaczonych dla osób narażonych na ryzyko powstawania odleżyn. Stosowana jest u osób długotrwale przebywających w pozycji siedzącej, u których występują zaburzenia przepływu krwi w obwodowym układzie krwionośnym. Wykorzystywana jest w profilaktyce przeciwodleżynowej oraz w leczeniu odleżyn do I stopnia (wg. NPUAP / EPUAP).

3. Montaż

Czynności przed pierwszym użyciem

Krok 1. Przeciwodleżynową poduszkę pneumatyczną należy umieścić na siedzisku stroną antypoślizgową do dołu. **Krok 2.** Otwór z zaworem poduszki powinien znajdować się z przodu siedziska. **Krok 3.** Należy usunąć z poduszki wszystkie obciążenia. **Krok 4.** Należy wyciągnąć

zawór poprzez otwór znajdujący się z przodu poduszki i upewnić się, że został wyciągnięty w całości. **Krok 5.** Należy otworzyć zawór przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i unosząc lekko zawór do góry. Poduszka pompuje się samoistnie. **Krok 6.** Po napompowaniu należy zamknąć zawór przekręcając zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Regulacja poduszki

Krok 1. Należy usiąść na napompowanej poduszce. **Krok 2.** Należy delikatnie otwierać zawór, do momentu w którym zacznie uchodzić powietrze. Strumień powietrza można regulować dodatkowo: nacisk na nakrętkę hamuje strumień powietrza, a uniesienie nakrętki do góry zwiększa strumień powietrza **Krok 3.** Należy wypuszczać nadmiar powietrza z poduszki do momentu, gdy użytkownik będzie siedział w wygodnej i stabilnej pozycji. **Krok 4.** Po wyregulowaniu poduszki zawór poduszki należy zamknąć.

Zdejmowanie i zakładanie pokrowca:

Aby zdjąć pokrowiec z poduszki należy otworzyć zawór poduszki, rozsunąć zamek pokrowca i delikatnie ściągnąć go z poduszki. Aby założyć pokrowiec na poduszkę należy otworzyć zawór poduszki i założyć pokrowiec od strony zaworu, tak by szara część poduszki znalazła się z tej samej strony co tkanina antypoślizgowa. Następnie należy delikatnie przełożyć zawór przez otwór w pokrowcu i zasunąć zamek, tak by jego uchwyt znajdował się pod paskiem ochronnym. Następnie należy ponownie napompować i wyregulować poduszkę. (Patrz CZYNNOŚCI PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM). Zaleca się, aby grubość poduszki nie była mniejsza niż 1,5 – 2 cm.

4. Specyfikacja techniczna

- Wymiary poduszki:
Głębokość: 40 cm
Wysokość: 8 cm
Szerokość: 41, 43, 46, 48 cm
- Maksymalne obciążenie: do 150 kg

- Waga poduszki: 0,9kg, 0,97kg, 0,98kg, 1,03kg
- Temperatura przechowywania: -25 C – 110 C
- Optymalna wilgotność powietrza: 50%

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą konserwację wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

Czyszczenie poduszki:

- Poduszkę należy czyścić wilgotną szmatką z użyciem łagodnych środków czyszczących posiadających atest PZH nie dopuszczając do jej zamoczenia, a po każdorazowej konserwacji wytrzeć do sucha. Używanie silnych środków myjących lub detergentów może doprowadzić do uszkodzenia wyrobu. Uporczywe plamy można usunąć z poduszki za pomocą miejscowego prania ręcznego.

Czyszczenie pokrowca:

- Pokrowiec można prać w pralce w temp. 60 C używając łagodnych detergentów. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zasunąć zamek pokrowca. Pokrowiec można suszyć strumieniem ciepłego powietrza lub w suszarce w niskiej temperaturze.










Dezynfekcja:

- Dezynfekcję należy przeprowadzać przy użyciu szmatki nasączonej łagodnym detergentem.

7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

8. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.
Dowiedz się więcej na www.timago.com
Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021