

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podpórka czterokołowa aluminiowa YOLA

Kod produktu: TGR-R RA 883 YOLA




1. Wykonanie

Podpórka czterokołowa, składana wykonana z ramy aluminiowej. Powlekana farbą z metalicznym połyskiem. Wyposażona w hamulce z zaciskiem postojowym, siedzisko z oparciem oraz podręczna torbę. Posiada pełne koła o wąskim przekroju o średnicy 8" z funkcją składania do transportu oraz regulowane na wysokość rączki zakończone anatomicznymi uchwytami. Konstrukcja opiera się na ramie krzyżakowej oraz owalnym przekroju rurek, dzięki czemu znacznie podwyższona została wytrzymałość na nacisk osiowy. Zestaw zawiera: ramę podpórki wraz z siedziskiem i oparciem, dwa uchwyty z hamulcami, torba na zakupy, dzwonek, śruby blokujące - 4 szt., przednie koła skrętne 8", tylne koła 8".

Elementy podpórki:

- a. uchwyt
- b. hamulec
- c. dzwonek
- d. oparcie
- e. torba
- f. linka hamulca
- g. sztyft blokujący
- h. śruba blokująca
- i. uchwyt składania siedziska
- j. uchwyt na kule
- k. dolna regulacja hamulca

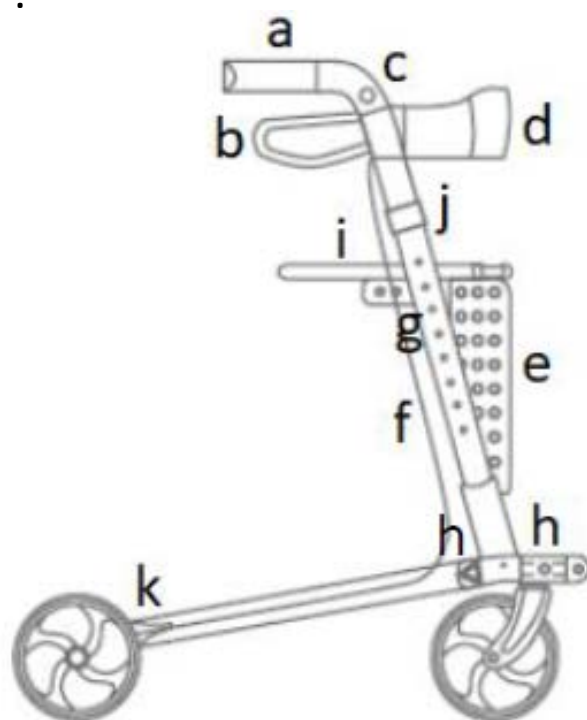

2. Zastosowanie

Podpórka czterokołowa jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób z obniżoną sprawnością ruchową, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecana jest także dla osób

starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.

3. Montaż

Rozłożenie i złożenie podpórki

- W pierwszej kolejności należy rozłożyć przednie koła i zabezpieczyć je śrubami blokującymi w otworach montażowych ramy w części mocowania kół. Następnie rozłożyć koła tylne i również należy zabezpieczyć je śrubami blokującymi w górnej części nóg tylnych.
- Aby rozłożyć podpórkę należy docisnąć siedzisko na środku tak, by wszystkie elementy podpórki dopasowały się do siebie i było słyszalne „kliknięcie”.
- Torbę należy zamontować w części przedniej podpórki.
- Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić dokręcenie śrub montażowych.
- Należy zdjąć plastikowe ochroniacze z kół.
- Aby złożyć podpórkę należy pociągnąć do góry za taśmę znajdującą się na środku siedziska.

Funkcja hamulców

- Aby zatrzymać podpórkę należy pociągnąć uchwyt hamulca do góry w kierunku uchwytu, następnie przytrzymać.
- W czasie postoju lub korzystania z siedziska należy zablokować hamulec zaciskiem postojowym pociągając uchwyt hamulca w dół.
- Aby zwolnić hamulec należy pociągnąć uchwyt hamulca w górę.

Regulacja wysokości uchwytów

- Aby wyregulować wysokość uchwytów, należy wcisnąć metalowy sztyft znajdujący się na zewnętrznej stronie ramy, następnie wybrać odpowiednią wysokość i zablokować położenie rurek względem siebie. Uchwyty należy ustawić na tej samej wysokości.

Regulacja hamulców

Dolna regulacja hamulca: Aby wyregulować hamulec i zwiększyć napięcie należy odkręcić śrubę regulującą przy pomocy narzędzi, następnie dokręcić śrubę zaciskową przytrzymując śrubę regulującą.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	64 cm
Głębokość całkowita	69 cm
Wymiary siedziska	46,5 cm x 26 cm
Wysokość siedziska od podłoża	53,5 cm
Regulacja wysokości uchwytów	79,5-92,5 cm
Waga	7,6 kg
Max obciążenie	130 kg
Max obciążenie torby	5 kg
Kolor ramy	grafitowy, pomarańczowy, zielony

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z podpórki, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja










- Ramę podpórki należy czyścić wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osuszyć.
- Nie należy używać ostrych środków polerskich, gdyż grozi to zniszczeniem powłok zabezpieczających.
- Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów podpórki (zawiasów, śrub zaciskowych, blokad).

7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką

otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

8. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.
Dowiedz się więcej na www.timago.com
Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021