

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podpórka czterokołowa aluminiowa

Kod produktu: **AMIGO-1 / AMIGO-2**




1. Wykonanie

Podpórka czterokołowa, składana wykonana z ramy aluminiowej. Powlekana farbą z metalicznym połyskiem. Wyposażona w hamulce z zaciskiem postojowym, siedzisko z oparciem oraz podręczną torbę. Posiada pełne koła o średnicy 9" oraz regulowane na wysokość ręczki zakończone anatomicznymi uchwytami. Konstrukcja opiera się na ramie krzyżakowej oraz owalnym przekroju rurek, dzięki czemu znacznie podwyższona została wytrzymałość na nacisk osiowy.

Zestaw zawiera: podpórkę wraz z siedziskiem i oparciem, torbę na zakupy.

Elementy podpórki:

- a. Uchwyt
- b. Hamulec z trybem postojowym
- c. Zacisk regulacyjny
- d. Linka hamulca
- e. Siedzisko z uchwytem
- f. Koło
- g. Szyna siedziska

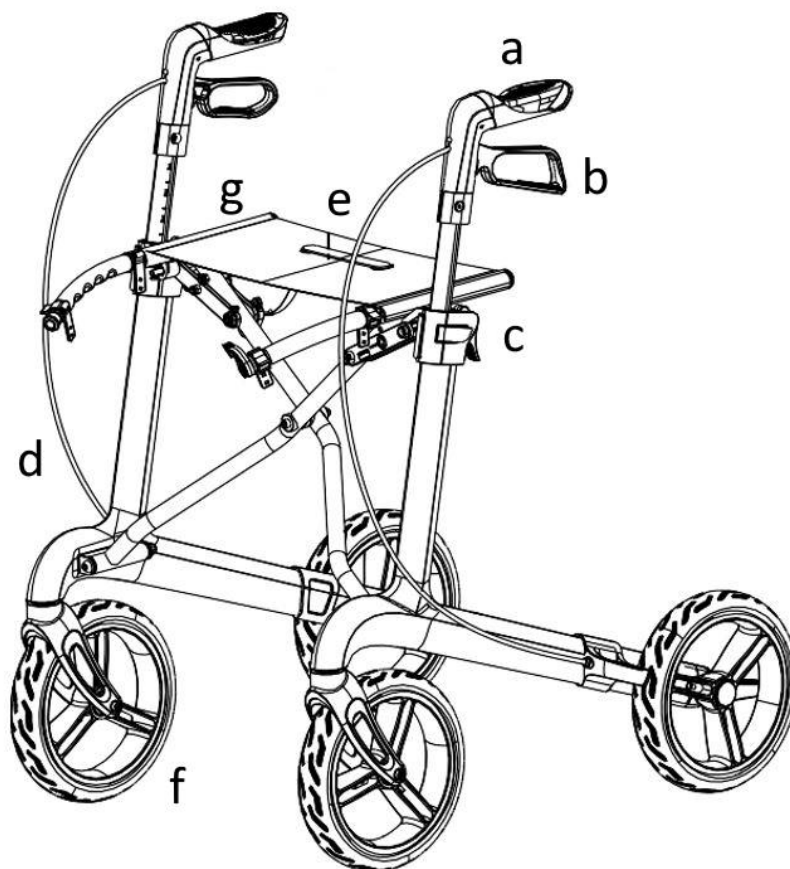

2. Zastosowanie

Podpórka czterokołowa jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecana jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.

3. Rozłożenie, złożenie i regulacja podpórki

Rozłożenie podpórki

- Aby rozłożyć ramę podpórki należy złapać oba uchwyty i pociągnąć je na zewnątrz.
- Docisnąć boczne szyny siedziska do momentu całkowitego rozłożenia (kliknięcie mechanizmu blokującego).

Złożenie podpórki


- Aby złożyć podpórkę należy podnieść siedzisko za uchwyt i podciągnąć go do góry.
- Złapać oba uchwyty podpórki i docisnąć je do wewnątrz.

Regulacja wysokości uchwytów

Aby wyregulować wysokość uchwytu, należy:

- Nacisnąć hamulec w dół aby ustawić tryb postojowy i unieruchomić podpórkę (Rys. 1).
- Pociągnąć zacisk regulacyjny (Rys. 2).
- Przytrzymać zacisk regulacyjny i wyregulować wysokość uchwytów (Rys. 3).
- Zwolnić zacisk regulacyjny aby zablokować ustawioną wysokość uchwytów. Pociągnąć kilka razy uchwyt do góry i w dół aby sprawdzić poprawne zablokowanie wysokości (Rys. 4).

- W podobny sposób wyregulować wysokość drugiego uchwytu.
- Oba uchwyty należy ustawić na tej samej wysokości.

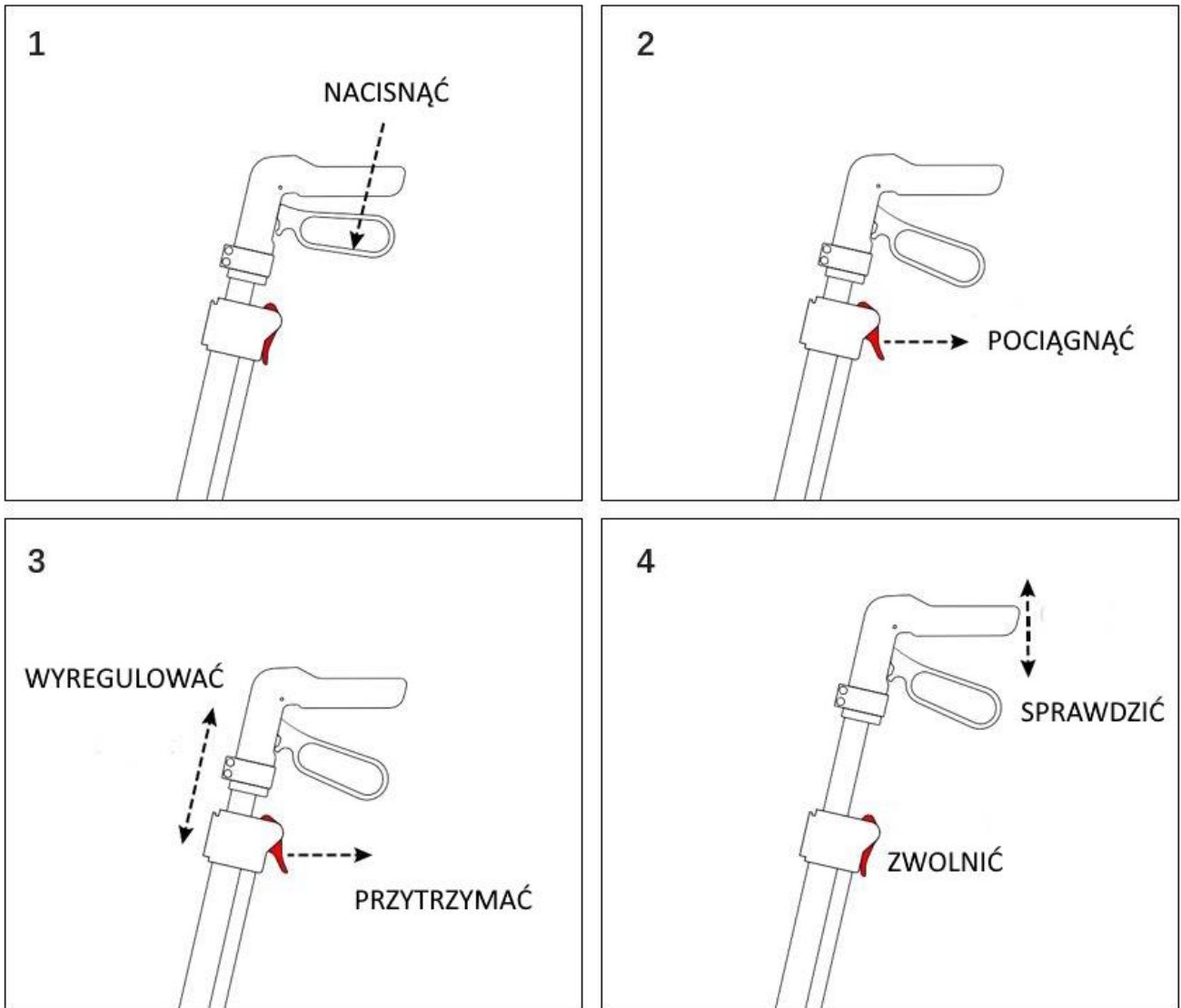

Funkcja hamulców

- Aby zatrzymać podpórkę należy pociągnąć uchwyt hamulca do góry w kierunku uchwytu, następnie przytrzymać.
- W czasie postoju lub korzystania z siedziska należy zablokować hamulec zaciskiem postojowym pociągając uchwyt hamulca w dół.
- Aby zwolnić hamulec należy pociągnąć uchwyt hamulca w górę.

Regulacja hamulców

Górna regulacja hamulca:

Należy odkręcić uchwyt linki, podciągnąć ją na odpowiednią odległość i następnie zablokować poprzez dokręcenie śruby zaciskowej.

Dolna regulacja hamulca:

Należy za pomocą klucza płaskiego poluzować śrubę mocującą, pociągnąć za czarną linkę hamulca tak, aby wyregulować napięcie linki, następnie należy dokręcić śrubę mocującą.

4. Specyfikacja techniczna

Parametr	AMIGO-1	AMIGO-2
Szerokość całkowita	60,5 cm	60,5 cm
Długość całkowita	72 cm	72 cm
Szerokość siedziska	25 cm	25 cm
Wysokość całkowita	67-82 cm	72-87 cm
Wysokość siedziska od podłoża	55 cm	55 cm
Waga	7,9 kg	8,1 kg
Max obciążenie	130 kg	130 kg
Maks. obciążenie koszyka	5 kg	5 kg
Kolor ramy	srebrny	srebrny

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z podpórki, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

Ramę podpórki należy czyścić wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osuszyć. Nie należy używać ostrych środków polerskich, gdyż grozi to zniszczeniem powłok zabezpieczających. Należy na bieżąco usuwać

zanieczyszczenia z ruchomych elementów podpórki (zawiasów, zacisków, blokad).










7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Produkt objęty jest gwarancją, której warunki zostały opisane w otrzymanej przez Państwa karcie gwarancyjnej. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.
Dowiedz się więcej na www.timago.com
Dziękujemy za wybór Timago!

NOTATKI:



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



07/2023(I)